

2211-TITAN

301 / 304 / 304F / 308

Masă de tratament electrică /



INTRODUCERE

Global Cosmetics Distribution SRL vă mulțumește pentru alegerea acestui produs. Sperăm că acest manual de instrucțiuni vă va ajuta să profitați la maximum de acest produs.

Contactați distribuitorul dacă aveți nevoie de clarificări privind utilizarea sau funcționarea acestuia.

Citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni înainte de a utiliza masa. Luați notă de avertismentele din acest manual.

Păstrați întotdeauna acest manual de instrucțiuni și, în cazul în care oferiți masa unui alt operator, asigurați-vă că furnizați și manualul, deoarece este o parte esențială a produsului.

Unele piese ale mesei pot diferi de imaginea care apare în cataloage, pe web, în broșuri comerciale sau în alte publicații.

Pentru a aduce îmbunătățiri mesei, producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile sau piesele acesteia fără a notifica prealabil.

Dacă, pe durata de viață utilă a acestei mese, are loc orice accident care cauzează sau ar fi putut cauza vătămări grave utilizatorului, Global Cosmetics SRL trebuie informat imediat.

CE ESTE ÎN CUTIE

Masă electrică de tratament: 1 unitate.

Controler manual: 1 unitate. (mod. 2211-304).

Cablu de alimentare: 1 buc.

Manual de instrucțiuni: 1 buc.

Suport pentru rolă de hârtie: 1 buc.

REGLEMENTĂRI ȘI STANDARDE DE PRODUS

Această masă respectă regulamentul european privind dispozitivele medicale (UE) 2017/745 și următoarele standarde:

- EN 60601-1:2006/A2:2021

Echipament electric medical. Partea 1: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială.

- EN 60601-1-6:2010/A2:2021

Echipament electric medical. Partea 1-6: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială. Standard colateral: Adecvarea pentru utilizare.

- EN 60601-1-2:2015

Echipament electric medical. Partea 1-2: Cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială. Standard colateral: Perturbații electromagnetice. Cerințe și teste.

SISTEM DE SIGURANȚĂ

Mesele electrice de tratament pot fi echipate opțional cu sistemul de siguranță integrat pentru a respecta

standardul german al Institutului Federal pentru Medicamente și Dispozitive Medicale (BfArM), (RFG).

Reglarea electrică a înălțimii meselor noastre este activată doar după o triplă apăsare în succesiune rapidă a barei perimetrale sau a pedalei, dacă este disponibilă, pentru a preveni reglarea neintenționată sau neautorizată.

Odată ce reglarea înălțimii este finalizată, se poate face o corecție în decurs de 5 secunde înainte ca patul să se oprească automat. Dacă întreruperea durează mai mult de 5 secunde, sistemul trebuie apăsat din nou de trei ori pentru activare.

UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI

Această masă este concepută pentru utilizare în medii clinice, estetice și de reabilitare, inclusiv clinici, centre de fizioterapie, cămine de îngrijire și cabinete medicale.

Această masă este destinată susținerii utilizatorilor în timpul tratamentului și nu trebuie utilizată pentru transportul pacienților.

Nu efectuați nicio modificare la masă fără autorizația Global Cosmetics Distribution SRL.

Vă rugăm să rețineți că orice utilizare necorespunzătoare sau modificare a mesei anulează garanția.

Contraindicații: Nu au fost descoperite încă.

PRECAUȚII ȘI INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Global Cosmetics nu este răspunzătoare pentru nicio daună materială sau personală cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a acestei mese în orice alt scop decât cele descrise în secțiunea "UTILIZAREA CORECTĂ A PRODUSULUI" de mai sus.

Inspectați starea bună a mesei înainte de a o utiliza pentru prima dată și în mod recurent, așa cum este indicat în secțiunea "ÎNTREȚINERE".

Nu utilizați masa în aer liber sau în locuri unde poate fi afectată de umiditate sau condiții meteorologice nefavorabile.

Condițiile ideale de utilizare sunt o temperatură între 5 -40 °C, o umiditate relativă între 30-75% și o presiune atmosferică între 860-1060 hPa.

Nu utilizați masa în medii în care alte dispozitive pot emite radiații electromagnetice. Aceste radiații ar putea afecta funcționarea corectă a mesei.

Această masă poate genera energie electromagnetică care poate interfera cu alte dispozitive electronice din apropiere.

Masa trebuie păstrată departe de accesul copiilor atunci când nu există supravegherea unui adult.

Masa este concepută pentru funcționare cu intervale discontinue, astfel încât timpul de funcționare continuă a motorului nu trebuie să depășească niciodată 2 minute. Dacă acest lucru se întâmplă, pot apărea daune din cauza supraîncălzirii componentelor electronice.

Utilizați întotdeauna accesorii și piese de schimb originale furnizate de distribuitorul dumneavoastră.

Acoperiți întotdeauna masa cu un prosop, hârtie de unică folosință sau o husă și schimbați-o pentru fiecare utilizator, asigurând astfel o igienă corectă și prelungind durata de viață a tapițeriei.

Conectați masa doar la o sursă instalată corespunzător. Tensiunea locală a rețelei trebuie să corespundă datelor tehnice ale dispozitivului.

Priza de alimentare trebuie să fie accesibilă în cazul în care masa trebuie deconectată rapid în orice moment.

Trageți întotdeauna de ștecher și nu de cablul de alimentare.

Deconectați masa de la sursa de alimentare înainte de a începe curățarea sau orice tip de operațiuni de întreținere.

Dacă cablul de alimentare electrică este defect, deconectați masa imediat și informați distribuitorul sau un tehnician specializat.

Poziționați cablul de alimentare corect, astfel încât să nu vă puteți împiedica de el.

Scoateți cablul de alimentare din priză dacă masa nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp.

Dacă detectați orice anomalie în funcționarea mesei, consultați distribuitorul sau un tehnician specializat.

Nu manipulați niciodată nicio componentă electrică și nu deschideți sau reparați nicio parte a mesei.

Doar distribuitorul sau un tehnician specializat trebuie să repare masa.

Nu atingeți niciodată masa sau cablul de alimentare cu mâinile ude.

Nu introduceți niciodată mâinile sau orice altă parte a corpului în niciun orificiu sau spațiu gol al mesei în timp ce aceasta este în funcțiune.

Asigurați-vă că nu există obiecte în spațiul de sub masă care ar putea cauza coliziuni sau blocaje în timpul mișcării acestora.

Asigurați-vă că picioarele nu se sprijină pe bara periferică pentru picioare în timpul tratamentului și mai ales când stați lângă masă. Acest lucru ar putea crea o situație periculoasă în care piciorul să fie prins între secțiune și bara periferică pentru picioare.

Țineți cont de distribuția greutății pe masă în timpul lucrului. Greutatea trebuie distribuită de-a lungul mesei fără a se concentra la capete pentru a menține stabilitatea corectă a acesteia.

Nu trebuie să vă așezați pe secțiunile pentru cap și picioare. Dacă faceți acest lucru, există pericolul de răsturnare.

INSTALARE

Plasați produsul într-o locație adecvată, în conformitate cu aspectul general, iluminarea naturală sau artificială și condițiile de operare ale salonului sau casei. Păstrați-l într-un mediu curat, uscat și răcoros.


Deschideți cutia de ambalare pentru a verifica dacă produsul este intact și dacă accesoriile sau piesele de schimb sunt complete. Vă rugăm să contactați distribuitorul sau pe noi dacă există vreo problemă.

Plasați produsul în poziția corectă. Vă rugăm să rețineți că nu este necesar să instalați șuruburi suplimentare pe


podea pentru a fixa patul, deoarece designul original a luat în considerare stabilitatea.

Dar vă rugăm să vă asigurați că produsul este plasat pe un sol ferm și plat, pentru a preveni orice accident. Dacă produsul se rotește sau se înclină din cauza solului neregulat, vă rugăm să reglați manual sau folosind o cheie hexagonală cele patru picioare din plastic (M10) și piulițele, care sunt fixate pe panoul inferior, pentru a asigura stabilitatea produsului.

Conectați ștecherul produsului la sursa de alimentare în mod corespunzător. Masa este echipată cu un cablu de alimentare cu trei fire și trebuie conectată. Această conexiune este esențială pentru a evita pericolele electrice și pentru a asigura o funcționare corectă.

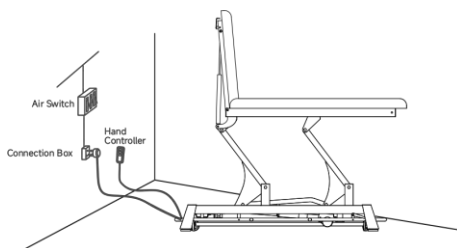

Plasați suportul pentru rola de hârtie în poziția indicată în imaginea de mai jos, introducându-l în cele două orificii din structura mesei de tratament.

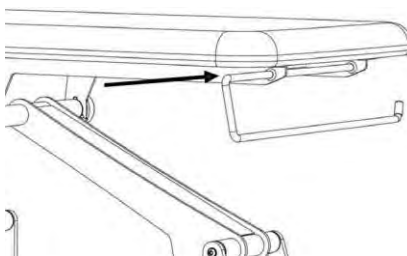

AMPLASAREA LA LOCUL DE MUNCĂ


Pentru o utilizare corectă, masa trebuie plasată pe un sol plat și stabil. Ancorele de podea nu sunt necesare.

Dacă trebuie să mutați masa, faceți acest lucru ținând-o de bază, niciodată de tapițerie sau de perne. Masa are 4 roți pentru a facilita deplasarea la locul unde va fi utilizată.


Odată poziționată corect, masa are un sistem de imobilizare reglabil care o împiedică să se miște în timpul utilizării.

Pentru a activa sau dezactiva acest sistem, trebuie să apăsați cu piciorul pe oricare dintre cele două pârghii, așa cum se arată în imaginile următoare.

- Imaginea 1: Masa în poziție de lucru.

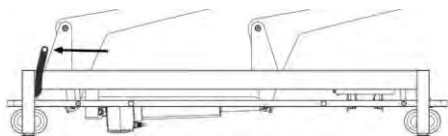

- Imaginea 2: Masa în poziție pentru mișcare.

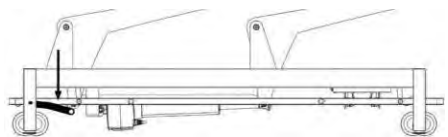

Operațiuni



Poate fi operată prin telecomandă manuală, pedală sau controler perimetral.

Funcții motorizate pentru controlerul perimetral.

- Ridicarea/coborârea generală a mesei

- Utilizați telecomanda manuală sau pedala integrată (în funcție de model). Apăsăți și mențineți butonul corespunzător până când este atinsă poziția dorită.
- Nu depășiți 2 minute de funcționare continuă. Așteptați cel puțin 18 minute înainte de a opera din nou motorul.

1. Standard Configuration (mod. 2211)
(Perimeter Controller)

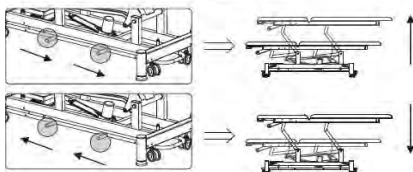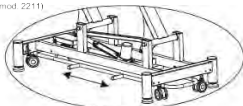

Funcții manuale

- Înclinarea spătarului
- Înclinarea suportului pentru picioare (în funcție de model)

Vezi pagina 24.

Informații despre produs

De la pagina 24 puteți găsi informații detaliate: schița mesei, măsurători și unghiurile posibile de mișcare ale fiecărei secțiuni.

Legenda simbolurilor și informații pe eticheta produsului.

- MODEL : Identificarea produsului.

- : Marcaj de conformitate CE.

- : Număr de serie unic care identifică produsul.

- : Data fabricației.

- INTRARE: Valorile necesare ale rețelei electrice de alimentare.

- PORNIT: 2 min / OPRIT: 18 min: Indică funcționarea discontinuă a dispozitivului conform IEC/EN 60601-1, ceea ce indică faptul că nu trebuie depășite 2 minute de funcționare continuă a motorului sau motoarelor.

- : Consultați instrucțiunile de utilizare sau manualul utilizatorului.

- : Clasificarea siguranței electrice - Tip B.

- IPX4: Protecție împotriva stropirii cu apă sau lichide.

- : Identificarea producătorului.

- : Reprezentant autorizat în UE.

- : Importator.

- : Dispozitiv medical.

- : Identificator unic al dispozitivului.

- : Produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat.

Depanare

Dacă, pe durata de viață a mesei, detectați orice defecțiune sau aveți nevoie de o reparație, contactați distribuitorul și nu utilizați masa până când nu ați primit un diagnostic favorabil sau masa a fost reparată.

Întreținere

Efectuați o inspecție vizuală cel puțin o dată pe lună pentru a verifica starea generală a mesei. Mai mult, trebuie să faceți următoarele:

- Verificați reglarea corectă a diferitelor secțiuni.
- Verificați funcționarea corectă a motoarelor și a mișcărilor acestora.
- Verificați și curățați pistoanele cu gaz.
- Verificați și strângeți șuruburile (dacă este necesar).

- Ungeți piesele cu fricțiune.
- Verificați starea cablajului electric și priza.
- Verificați sistemul de imobilizare a roților.

DURATA DE VIAȚĂ A MESEI

Masa are o durată de viață de 8 ani. Totuși, această perioadă poate fi prelungită pentru perioade de 2 ani, conform evaluărilor efectuate de un distribuitor autorizat sau de **Global Cosmetics**.

RECICLARE

Distrugeți și eliminați acest produs în siguranță, urmând recomandările comunității dumneavoastră pentru eliminarea produselor electronice. Vă rugăm să fiți atenți la problemele de mediu și să nu aruncați niciodată motoarele sau piesele electrice la gunoier municipal. Dacă suspectați că produsul poate fi contaminat biologic, utilizați procedurile de eliminare ale comunității dumneavoastră.

GARANȚIE

Global Cosmetics Distribution SRL garantează produsele împotriva defectelor de fabricație timp de 2 ani de la data facturii.

Orice garanție va fi nulă dacă instrucțiunile de utilizare și întreținere nu au fost respectate, dacă s-au adus modificări produselor, dacă au fost înlocuite piese sau dacă au fost utilizate materiale care nu îndeplinesc specificațiile produselor producătorului original.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE

Înainte de a curăța masa, scoateți-o din priză.

Curățați masa după fiecare utilizare.

Ștergeți praful de pe masă cu o cârpă moale și uscată.

Pentru a curăța tapițeria, aplicați o soluție de apă caldă și un detergent blând (de exemplu, săpun neutru) cu o cârpă moale bine stoarsă.

Dezinfectați tapițeria și alte suprafețe cu un bactericid adecvat acestui scop.

Aplicați dezinfectantul pe o cârpă moale, niciodată direct pe masă.

Nu utilizați niciodată un amestec de dezinfectanți sau un amestec de dezinfectant și săpun.

Evitați acumularea de umiditate pe piesele mobile ale structurii metalice, deoarece ar putea rugini.

Deoarece nu știm ce dezinfectant va fi utilizat, nu putem garanta că acesta nu va cauza daune tapițeriei. Citiți cu atenție instrucțiunile și avertismentele de utilizare ale produsului dezinfectant înainte de achiziționarea sau utilizarea acestuia.

CONTACT

Importator:

Global Cosmetics Distribution SRL



077040, Str. Soarelui 88, Chiajna

Ilfov, ROMANIA

info@echipamente

saloeane.ro

+0755105511

Producător:



SILVERFOX CORPORATION LIMITED

Nr. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town,

Districtul PengJiang, Orașul JiangMen,

Provincia Guangdong, R.P. Chineză